



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prawidłowe korzystanie z monitora oddechu RespiSense w znacznym stopniu zwiększy Twoje doświadczenie jako użytkownika. Prosimy o uważne przeczytanie tych instrukcji.


Monitor oddechu RespiSense rekomendowany jest przez POLSKIE TOWARZYSTWO NEONATOLOGICZNE.

Urządzenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez :
Instytut Matki i Dziecka, nr Op-4309, ważna do 15.01.2013
oraz Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

WAŻNE:


Przed rozpoczęciem korzystania z monitora dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje • Stosuj się do tych instrukcji przez cały okres użytkowania monitora • Korzystaj z monitora rozsądnie, ponieważ nie jest on w stanie zlokalizować wszystkich zagrożeń oddechowych • Do podtrzymywania monitora nie stosuj prowizorycznych uchwytów, gdyż takie rozwiązanie może być niebezpieczne dla zdrowia dziecka • Przed każdym użyciem sprawdź stan monitora i nie korzystaj z niego jeśli jest uszkodzony, zużyty lub nieadny do użytku • Monitor może być używany jedynie wtedy, gdy jego alarmy będą z łatwością słyszalne przez opiekuna • Nie otwieraj monitora • Nie wkładaj do środka żadnych części • Gdy monitor nie jest używany, trzymaj go w bezpiecznym miejscu i z dala od dzieci • Zawiera małe części, które mogłyby być niebezpieczne dla dzieci w przypadku rozbioru • Pożądaj się części opakowania, które mogą być niebezpieczne dla dzieci • W określonych przypadkach do uratowania dziecka niezbędne mogą być sztuczne oddychanie i masaż serca (CPR).

Wystrzegaj się silniejszych ruchów zewnętrznych, które mogłyby wprowadzić monitor w błąd, np. podczas podróży lub pchania wózka z dzieckiem po nierównej powierzchni oraz dopuszczania by monitor podczas swojej pracy dotykał również ciała innej osoby. W takich sytuacjach, i w szczególności przy wyborze trybu wyższej czułości (patrz Wskazówki powyżej), monitor może nie być w stanie prawidłowo odróżnić ruchów dziecka od ruchów zewnętrznych.

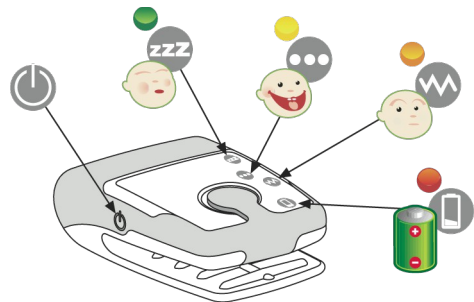


OBSŁUGA MONITORA


WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

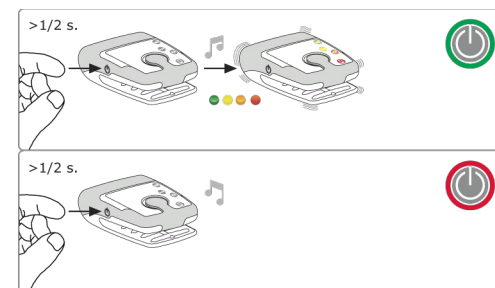


Sygnal gotowości działania

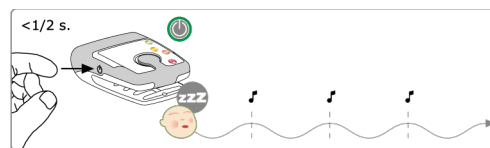

TESTOWANIE MONITORA I BATERII

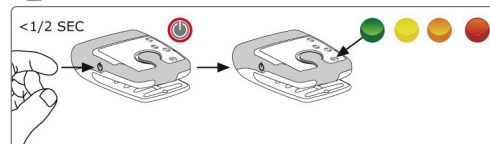

PRZYMOCOWANIE MONITORA

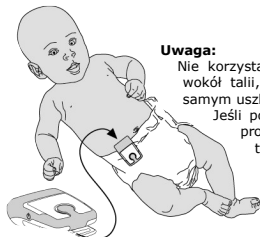

Uwaga:

Nie korzystaj z monitora na grubych gumkach wokół talii, które mogą się przekrzywić i tym samym uszkodzić zacisk w monitorze.

Jeśli pozwolisz, by dziecko spało na boku, proszę przytwierdź monitor lekko do tego samego boku, aby zapewnić jego dobry kontakt z brzuchem dziecka i pozwolić na jego optymalne funkcjonowanie.

Wskazówki:


ZIELONE światło zapali się, gdy stwierdzony zostanie ruch rytmiczny, głównie podczas snu dziecka.

ŻÓŁTE światło zapali się, gdy zostanie stwierdzony ruch ogólny, nierytmiczny.

POMARAŃCZOWE światło jest wskaźnikiem gotowości i zapali się, gdy wystąpią następujące okoliczności: jeśli uruchomiono stymulator dotyku, ale ruch został wznowiony ponownie przed upływem pięciu sekund, monitor zaświeci się na POMARAŃCZOWO, a nie na ZIELONO ani ŻÓŁTO.

CZERWONE światło jest systemowym wskaźnikiem ostrzegającym i zapali się, gdy Bateria jest prawie wyczerpana (czerwone światło zapali się podczas ruchu, zamiast innych światel).

DZIAŁANIE MONITORA

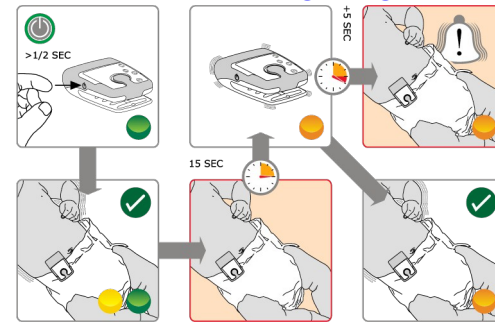

Alarmy:

- Pierwotny alarm (szybki świergoczący dźwięk) wystąpi, jeśli nie został stwierdzony żaden ruch przez okres 20 kolejnych sekund. Mimo, że mogłoby to wskazywać, że dziecko wymaga pilnej uwagi ze strony opiekuna lub specjalisty medycznego, zawsze najlepszym rozwiązaniem na tego typu alarm będzie możliwie najbardziej spokojna reakcja. Nigdy nie trzęść dzieckiem!
- Wtórny alarm (powolny świergoczący dźwięk) wystąpi, jeśli stymulator dotyku został uruchomiony sześciokrotnie, ale ruch został za każdym razem wznowiony przed upływem 5 sekund od momentu stymulacji. To może wskazywać, że urządzenie lub pielucha nie są odpowiednio przytwierdzone, że pielucha stała się zbyt mokra i wypycha monitor z okolic brzucha dziecka, lub że ruch został wstrzymany albo stał się zbyt płytki, aby go stwierdzić, ale pojawił się ponownie po stymulacji. Spróbuj wokół talii zacisnąć gumkę pieluchy, zmienić mokrą pieluchę lub użyć pieluchy o większym rozmiarze.

Rejestracja Twojego monitora: Proszę o natychmiastowe zarejestrowanie Twojego monitora. Rejestracja monitora pozwoli Ci wczytać fotografię Twojego dziecka do albumu na stronie RespiSense. Zgromadzone informacje są wykorzystywane do ulepszenia produktów oraz usług Infantrust i nigdy nie zostaną użyte do dystrybucji jakichkolwiek materiałów reklamowych. Wszystkie dostarczone informacje są chronione polityką prywatności Infantrust i z nikim się nimi nie podzielimy, nie sprzedamy, ani nie wynajmujemy ich. Możesz dokonać rejestracji poprzez naszą stronę internetową www.respiSense.com

Wskazówki:

- Aby zapewnić prawidłowe działanie i zminimalizować ryzyko fałszywych alarmów, sprawdź, czy pielucha dziecka jest wygodnie przytwierdzona i wystarczająco duża, tak by górna krawędź monitora mogła być blisko poziomu pępka dziecka. Ruchy w brzuchu dziecka są najłatwiejsze do przesłonięcia w miejscu tuż obok pępka dziecka. Jeśli okaże się, że urządzenie ma trudności w śledzeniu tych ruchów, oznacza to, że pielucha może być niewygodnie przytwierdzona lub zbyt mała.
- Jeśli używane pieluchy są bardzo cienkie, lepszy uchwyt możemy osiągnąć, przesuwając mały kawałek materiału po krawędzi pieluchy zanim ustawimy monitor na pieluszcze. Jeśli nastąpi zsuniecie monitora w trakcie działania, co jest jednak mało prawdopodobne, wówczas nie dojdzie do wycucia ruchów dziecka ani alarmu.

Proszę o kierowanie wszystkich zapytań dotyczących produktów do swojego lokalnego dystrybutora. Wszystkie komentarze i sugestie wysyłaj do support@infantrust.com i info@respiSense.pl. Wejdź na www.respiSense.com i www.respiSense.pl, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje i prezentacje produktów.

Użycie monitora audio/video (opcjonalnie): Możesz przełączyć dźwięk alarmu monitora do innych przedmiotów poprzez wybranie zestawu najbardziej odpowiadającego Twoim potrzebom z szerokiego zakresu dostępnych na rynku monitorów dźwięku dla niemowląt (nianie). Możesz wybierać między prostymi monitorami dźwięku, monitorami audio-video, a monitorami audio-ciepło, używającymi technologii cyfrowej lub analogowej, z pojedynczym, podwójnym lub wieloma kanałami, a także w wersji z doładowaniem lub podłączeniem do sieci elektrycznej. Stosuj się do instrukcji użytkowania tych urządzeń i sprawdzaj efektywność swojej instalacji, aby się upewnić, że będziesz w stanie prawidłowo reagować na alarmy monitora.


Gwarancja producenta: INFANTRUST zapewnia gwarancję na okres 2 lat od daty zakupu. Klient jest zobowiązany do dostarczenia dowodu zakupu przy każdej reklamacji. Okres użytkowania baterii nie podlega gwarancji. W okresie obowiązywania gwarancji INFANTRUST ma

obowiązek wyeliminować każdy defekt monitora wynikający z wad materiałów lub jakości wykonania poprzez bezpłatną wymianę monitora z wyłączeniem kosztów transportu. Ta gwarancja obejmuje każdy kraj, do którego ten monitor jest dostarczany przez INFANTRUST lub wskazanego przez niego dystrybutora. **Gwarancja traci ważność w przypadku zniszczenia, zalania lub prób przerabiania monitora.**

KONSERWACJA

Wymiana baterii:

Uwaga: Unikaj kontaktu baterii z ogniem • Nie ładuj i nie montuj zużytej baterii ponownie. Nie miazdź. Nie rozgrzewaj baterii powyżej 100° i nie pal jej • Chronić przed dziećmi • Trzymaj baterię w oryginalnym opakowaniu aż do momentu użycia • Natychmiast pozbądź się zużytej baterii • Nie wkładaj baterii do ust • Chronić przed słońcem, wysoką temperaturą i wilgotnością • Unikaj skroplonej pary. Używaj zgodnie z przeznaczeniem.

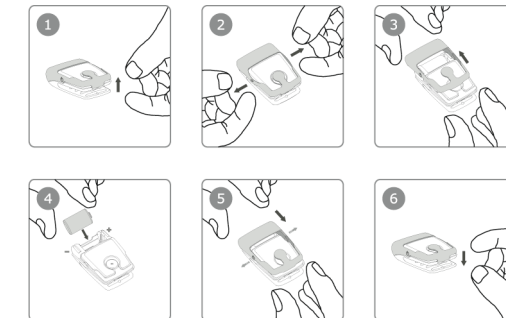

W celu umycia urządzenia, przetrzyj je miękką, lekko wilgotną tkaniną. Nie płucz monitora ani nie zanurzaj go w żadnym płynie. Unikaj również przysięcia płynu do jakiegokolwiek otworu. **Dostanie się płynu do środka spowoduje utratę gwarancji.** Podczas mycia nie używaj żadnych chemikaliów, gdyż może to podrażnić skórę dziecka. Uważaj by szarpie i brud nie dostały się do otworu dźwiękowego, by alarm nie został zgłoszony.

WAŻNE: Ten monitor oddechu jest wsparciem dla rodzica a nie urządzeniem medycznym ani substytutem opiekuńczej opieki człowieka. Jest przeznaczony do użycia w bezpiecznych warunkach i należy go użytkować w sposób odpowiedzialny oraz zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami wymienionymi tutaj. Monitor nie jest przeznaczony do wykrywania bezdechu wywołującego zapać. Diagnoza i monitorowanie choroby muszą być przeprowadzone przez specjalistę medycznego. Wcześniaki, inne niemowlęta o wysokim ryzyku oraz niemowlęta u których stwierdzono predyspozycję do bezdechu powinny być monitorowane przez lekarza. Ten produkt nie jest receptą na wszystkie problemy z oddychaniem, ani nie jest zaprojektowany do użytku w sytuacjach ratowania życia. Klienci używają tego monitora na swoje własne ryzyko, a Infantrust Parenting Solutions (Proprietary) Limited, jego pracownicy, agenci, kontrahenci, producenci, dystrybutorzy, ani wspólnicy ("INFANTRUST") nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za żadne zagubienie, zniszczenie ani szkody, nie wyłączając pośredniego zagubienia, zniszczenia lub szkody, których ofiarą jest klient lub jakiegokolwiek innej w wyniku jakiegokolwiek defektu (bez względu na rodzic czy osobę anonimową) monitora. Zatem wszystkie gwarancje, bez względu na wyrażone jednoznacznie, czy w sposób jednoznaczny lub domyślny, oraz każda inna forma odpowiedzialności wynikająca z jakiegokolwiek przyczyny, niniejszym nie mają żadnego zastosowania, a klient sam sobie wynagradza ewentualne straty i uznaje INFANTRUST wolnym od jakiegokolwiek zobowiązań wynikających z opisanych sytuacji.

Specyfikacje techniczne:

Bateria	RespiSense ER14250M 3.6V Lithium.
Pierwotny alarm	Szybki świergoczący dźwięk 2.7kHz.
Wtórny alarm	Powolny świergoczący dźwięk 2.7kHz.
Auto-test włączania	Testuje wewnętrzna integralność i stan baterii oraz uruchamia wszystkie tryby wyjścia do potwierdzenia przez użytkownika.

Zaprojektowano i wyprodukowano w Republice Południowej Afryki przez Infantrust Parenting Solutions (Pty) Ltd., PO Box 3316, Matieland, 7602, Republika Południowej Afryki. Zastosowanie mają patenty ZA2006/01793 i GB2419961. Dalsze patenty w zależności od kraju.

Wszystkie prawa zastrzeżone; RespiSense, Infantrust, TummyTickle i wszystkie związane z nimi logo są znakami firmowymi.

Przy dokonywaniu poprawek w monitorach RespiSense wygląd specyfikacja monitora mogą być modyfikowane bez uprzedzenia.